



Кинезио тейп

Данный документ распространяется на кинезио тейпы **TOLL!** и является руководством по их эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.
Перед использованием, пожалуйста, прочтите руководство и придерживайтесь всех рекомендаций руководства.
Актуальная информация по данному изделию, рекомендации по его эксплуатации и способам применения, а также информация по остальным нашим продуктам на нашем сайте:
www.tollsport.com

Внимательно прочитайте руководство до начала использования изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

2

Информация о видах опасных воздействий:
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Назначение:

- Спортивная защита;
- Косметология;
- Жиросжигание;
- Профилактика ушибов, травм и растяжений;
- Мышечное напряжение и боли;
- Профилактика и забота о здоровье;
- Является изделием общего назначения и не предназначен для применения в медицинских целях.

3

Применение:

Тейпирование повышает тонус кожи и снижает мышечное напряжение – это приводит к разглаживанию морщин, уменьшению отечности и ускорению восстановления тканей. Профилактика с применением кинезио тейпа в молодом возрасте помогает сохранить привлекательный внешний вид на годы вперед. Лента улучшает обменные процессы в подкожных тканях, что приводит к ускорению избавления от лишнего веса. Клеевой слой на тейпе нанесен волнообразно, что создает неравномерное воздействие на кожу и направляет поток нервных импульсов, а в результате нормализуется работа мышц и снижается болевой дискомфорт. Нанесение клейкой ленты при реабилитации после травм помогает сократить сроки восстановления.

4

Используйте кинезио тейп, если чувствуете боль и дискомфорт, и для того, чтобы продлить молодость и свободу в движениях!

Информация о сертификации:
не подлежит обязательной сертификации

Состав:
Водонепроницаемая эластичная ткань, клеевая основа Toyo Ink

Описание:
Кинезио тейп **TOLL!** изготовлен в форматах шириной 2,5 см и 5 см, для комфортного применения на теле и лице. Длина смотанной в рулон ленты составляет 5 метров для удобства в хранении и продолжительного периода использования. Тейп **TOLL!** фиксируется на коже при помощи экологичного

5

клеевого слоя компании Toyo Ink, произведённого в США и волнообразно нанесенного на ленту – он безопасен и гипоаллергенен, а еще обладает продолжительным периодом активного действия. Кинезио тейп TOLL! держится на коже в течение 3-х дней, сохраняя эффективность даже после контакта с водой. Используйте оригинальные кинезио тейпы TOLL!, как в единичном исполнении, так и в наборах по 2 и 3 рулона. Меры безопасности: Не используйте кинезио тейп не по назначению, указанному в данном руководстве. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом и ознакомиться с техниками его нанесения, приведенными на нашем сайте www.tollsport.com.	Не используйте клейкую ленту при наличии открытых ран и повреждениях кожного покрова, при заболеваниях почек, проблемах с сердечно-сосудистой и дыхательной системами, при наличии сахарного диабета и тромбоза вен. Инструкции по эксплуатации: 1) Отмерьте и отрежьте кинезио тейп необходимой длины. 2) Отрежьте столько лент, сколько необходимо для определенного участка тела. 3) На отрезанных лентах ножницами закруглите углы с каждой стороны. 4) Отсоедините небольшой участок тейпа от бумажной основы. 5) Максимально растяните мышцу в области нанесения кинезио тейпа. 6) Начните клеить тейп, постепенно отсоединяя бумажную основу.	7) Для надежной фиксации и получения эффекта от тейпа не требуется его избыточного натяжения при нанесении. 8) Равномерно наклейте тейп разглаживающими движениями кисти руки. 9) После наклеивания всех лент интенсивно разотрите их поверхность, для активации клеевой основы и полной фиксации. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности, чтобы предотвратить загрязнения, механические повреждения и воздействие атмосферных осадков. УТИЛИЗАЦИЯ Изделие необходимо утилизировать в соответствии с требованиями местного законодательства.	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ Наименование: Кинезио тейп Товарный знак: TOLL! Тип изделия: Спортивная лента Арт. №: TL-KT1101 - TL-KT9999, Цвет: Указан на этикетке или упаковке Форма выпуска: Рулон Ширина: 2,5 см; 5 см Длина: 5 метров Гарантийный срок: 2 года Условия гарантии: Предоставляется при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, изложенных в настоящем руководстве. Производитель: RITZ GmbH Сделано в: Китай Адрес: Taschenmacherstrasse 14-16, 23556 Lübeck, Schleswig-Holstein Deutschland	По вопросам качества товаров TOLL! и гарантийного обслуживания обращайтесь к уполномоченному производителем лицу: ИП Новиков А.А. ОГРНИП 321784700161243, E-mail: product@ritzgmbh.com, тел: 8-800-777-59-80 По вопросам сотрудничества и оптовых закупок товаров TOLL! обращайтесь к продавцу: ИП Новиков А.А. ОГРНИП 321784700161243, E-mail: sales@ritzgmbh.com, тел: 8-800-777-59-80 Импортёр: ИП Новиков А.А. ОГРНИП 321784700161243 Дата изготовления: Дата изготовления указана в формате ММ.ГГ на этикетке или упаковке. Серия: KTTL001
--	---	--	---	--